



GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL

icare
ic100

Solo
con receta

ENCENDIDO DEL TONÓMETRO Y CARGA DE LA SONDA

1. Presione el botón de selección o medición para encender el tonómetro. Ilustraciones de estas formas alternativas de empezar: *(No olvide utilizar la muñequera)*



Presione el botón de selección

Presione el botón de medición

2. Abra el tubo de la sonda retirando el tapón e inserte la sonda en la base para sonda tal como se muestra en la imagen.




3. Cuando aparezca el símbolo de reproducción en la pantalla, el tonómetro estará listo para realizar mediciones.





MEDICIÓN

- Paso 1.** Pida al paciente que se relaje y mire al frente hacia un punto concreto.
Acerque el tonómetro al ojo del paciente.

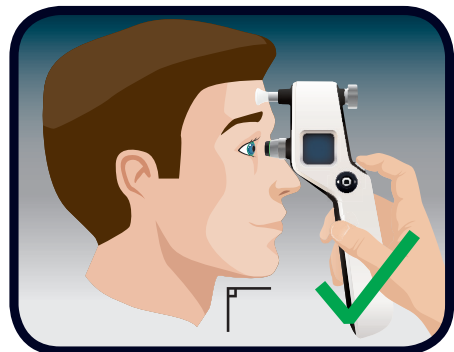

Paso 2. Mantenga la sonda en posición horizontal y apuntando en dirección perpendicular hacia el centro de la córnea. La distancia desde la punta de la sonda hasta la córnea del paciente debe ser de 4 a 8 mm. La luz de la base para sonda debe ser de color verde.

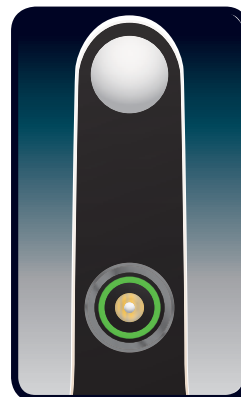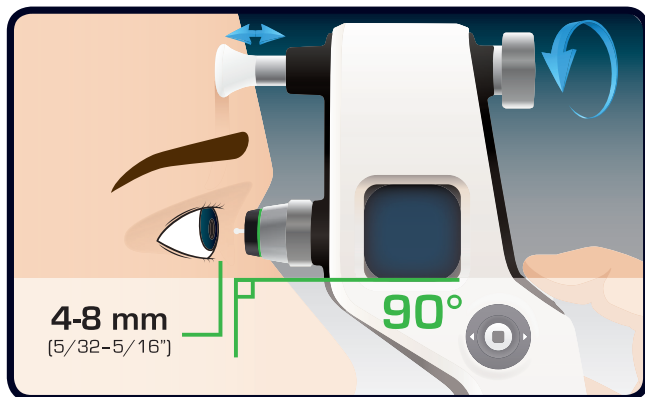

Indicación luminosa verde de la base para sonda

PASO 3. Presione el botón de medición para medir la PIO.

La sonda entrará en contacto con el ojo durante las mediciones: mantenga presionado el botón para realizar 6 mediciones seguidas o bien presione el botón brevemente 6 veces para realizar 1 medición cada vez.



UN TONO CORTO —

Indica que se ha realizado una medición correctamente.


DOS TONOS — —

Indica una medición incorrecta. (Consulte los mensajes de error en el manual completo).

UN TONO LARGO — — — —

Indica que se han realizado seis mediciones correctamente y se muestra el resultado de la PIO en la pantalla.

PANTALLA DURANTE LAS MEDICIONES

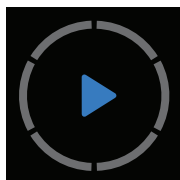

Antes



Después de la segunda medición



Después de la sexta medición




Después de la sexta medición con una variación aceptable



Después de la sexta medición con una variación excesiva

PARTES DEL TONÓMETRO

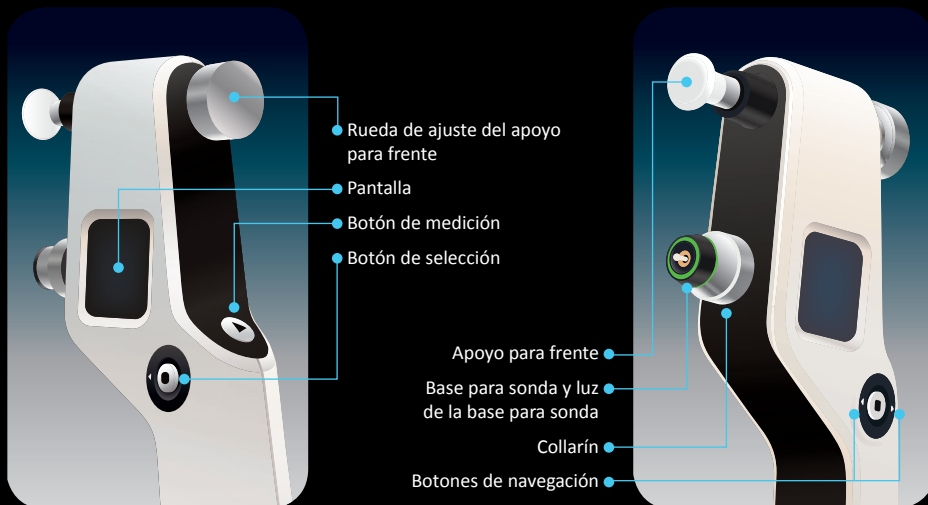

CAMBIE/LIMPIE LA BASE PARA SONDA PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR REPARACIONES INNECESARIAS.

LIMPIEZA DE LA BASE PARA SONDA

La base para sonda puede reutilizarse después de una limpieza meticulosa. Asegúrese de que la base para sonda esté totalmente seca antes de usarla.

1. Desenrosque el collarín de la base para sonda y retire con cuidado la base para sonda del tonómetro.
2. Sumerja boca abajo la base para sonda dentro de un recipiente lleno con una solución de alcohol, deje la base para sonda dentro del recipiente y manténgala en remojo entre 5 y 30 minutos.
3. Seque la base para sonda con aire comprimido.
4. Vuelva a insertar con cuidado la base para sonda completamente seca en el tonómetro y vuelva a enroscar el collarín.

Consulte el manual para ver instrucciones detalladas sobre cómo cambiar y limpiar la base para sonda.



www.icaretonometer.com

Consulte el manual para obtener información adicional.

