



PIKAOHJE
SUOMI

icare
ic100

Rx Only

VIRRAN KYTKEMINEN TONOMETRIIN JA ANTURIN ASETTAMINEN PAIKALLEEN

1. Kytke tonometriin virta painamalla valinta- tai mittauspainiketta. Kuvat eri tavoista kytkeä virta:
(Muista käyttää rannehihnaa)



Paina valintapainiketta

Paina mittauspainiketta

2. Avaa anturin putki poistamalla sen päältä suojuksen ja aseta anturi anturin kantaan kuvan mukaisesti.




3. Kun näyttöön ilmestyy sininen nuoli, tonometri on valmis mittauksiin.





MITTAUS

- Vaihe 1.** Pyydä potilasta rentoutumaan ja katsomaan suoraan eteenpäin kiinteään pisteeseen. Vie tonometri lähelle potilaan silmää.

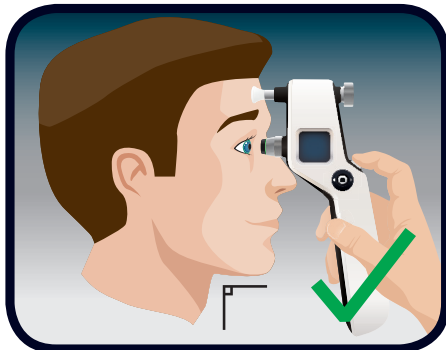

Vaihe 2. Varmista, että anturi on vaakasuorassa ja osoittaa suoraan kohti sarveiskalvon keskipistettä. Etäisyyden anturin kärjestä potilaan sarveiskalvon keskelle on oltava 4–8 mm. Anturin kannassa on oltava vihreä valo.

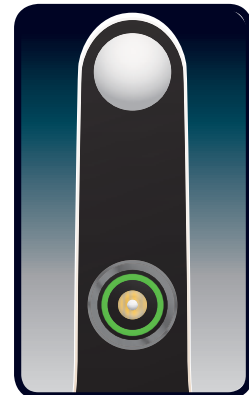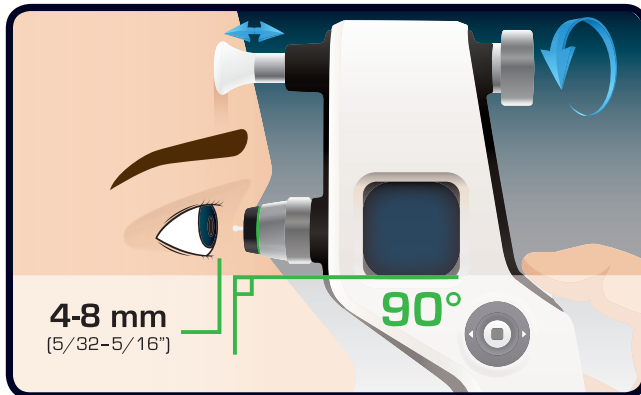

Anturin kannassa palaa vihreä merkkivalo

Vaihe 3. Mittaa silmänpaine painamalla mittauspainiketta.

Mittausten aikana anturi koskettaa silmää: Kun painat painiketta ja pidät sen pohjassa, laite tekee kuusi mittausta peräkkäin. TAI voit painaa painiketta lyhyesti kuusi kertaa, jolloin laite tekee yhden mittauksen kerrallaan.



YKSI LYHYT ÄÄNIMERKKI —

Ilmoittaa yhden mittauksen onnistuneen.


KAKSI ÄÄNIMERKKIÄ — —

Ilmoittaa yhden mittauksen epäonnistuneen. [Katso virheilmoitukset käyttöohjeista.]

PITKÄ ÄÄNIMERKKI ———

Ilmoittaa, että kuusi perättäistä mittausta onnistui ja silmänpainetulos näkyy näytössä.

NÄYTTÖ MITTAUSTEN AIKANA

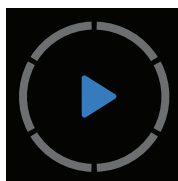

Ennen mittausta




Toisen mittauksen jälkeen



Kuudennen mittauksen jälkeen




Kuudennen mittauksen jälkeen, jos mittaustulokset vaihtelivat hyväksyttävissä rajoissa

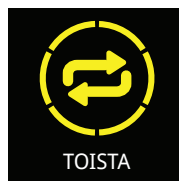

TOISTA

Kuudennen mittauksen jälkeen, jos mittaustulokset vaihtelivat liikaa

TONOMETRIN OSAT

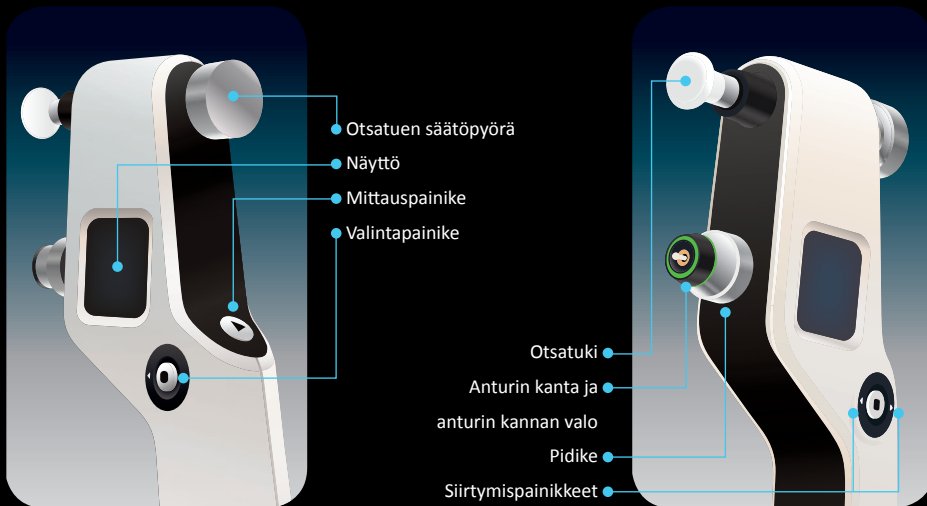

VAIHDA/PUHDISTA ANTURIN KANTA SÄÄNNÖLLISESTI, ETTÄ SEN HUOLTOVÄLI PITENEE.

ANTURIN KANNAN PUHDISTAMINEN

Anturin kantaa voidaan käyttää uudelleen, kun se on puhdistettu huolellisesti. Ennen kuin käytät anturin kantaa, varmista, että se on täysin kuiva.

1. Kierrä anturin kannan pidike irti ja irrota anturin kanta varovaisesti tonometrasta.
2. Käännä laitetta 70–100-prosenttista alkoholia sisältävän puhdistusastian yläpuolella siten, että kanta putoaa astiaan. Anna alkoholin vaikuttaa 5–30 minuuttia.
3. Kuivaa anturin kanta suihkuttamalla siihen paineilmaa.
4. Aseta täysin kuivunut anturin kanta varovaisesti takaisin, kierrä pidike takaisin paikalleen tonometriin.

Tarkempia tietoja anturin kannan vaihtamisesta ja puhdistamisesta saat käyttöohjeesta.

www.icaretonometer.com

Lisätietoja saat käyttöohjeesta.

