



GUIDA RAPIDA

ITALIANO

icare
ic100

Solo Rx

ACCENSIONE DEL TONOMETRO E CARICAMENTO DELLA SONDA

1. Premere il tasto di selezione o di misurazione per accendere il tonometro. Figure che mostrano questi modi alternativi di avvio: (*ricordarsi di usare il cinturino da polso*)



Pressione del pulsante di selezione

Pressione del pulsante di misurazione


2. Aprire il tubo della sonda rimuovendo il coperchio e inserire la sonda nell'apposita base, come illustrato nella figura.





3. Quando il simbolo di riproduzione appare sul display, il tonometro è pronto per le misurazioni.

MISURAZIONE

- Punto 1.** Invitare il paziente a rilassarsi e a guardare dritto davanti a sé, verso un punto specifico. Avvicinare il tonometro all'occhio del paziente.

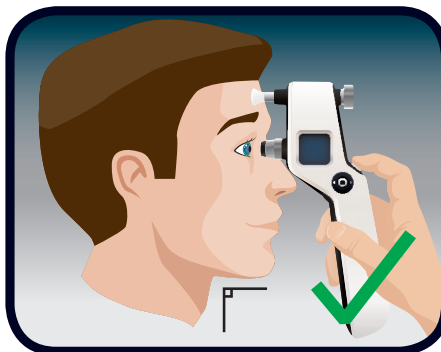

Punto 2. Mantenere la sonda in posizione orizzontale e perpendicolare rispetto al centro della cornea. La distanza dalla punta della sonda al centro della cornea del paziente deve essere di 4-8 mm. La spia sulla base della sonda deve essere di colore verde.

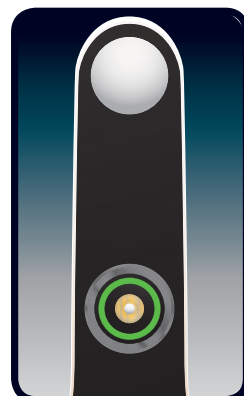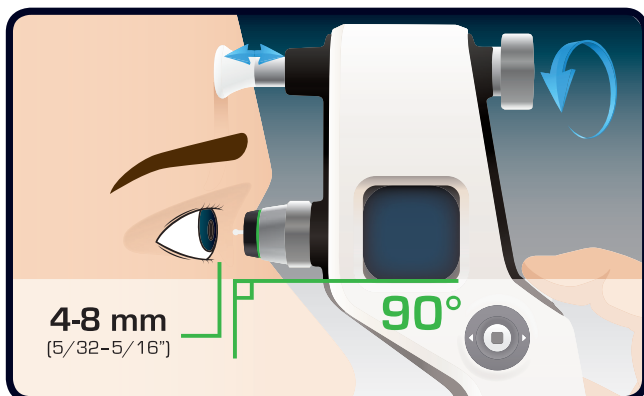

Spia sulla base della sonda di colore verde

Punto 3. Premere il pulsante di misurazione per misurare la PIO.

La sonda verrà a contatto con l'occhio durante le misurazioni: tenere premuto il pulsante per eseguire 6 misurazioni consecutive OPPURE premere brevemente il pulsante 6 volte per eseguire una misurazione per volta.




UN SEGNALE ACUSTICO BREVE —
Indica una misurazione singola corretta.

SEGNALE ACUSTICO DOPPIO — —
Indica una misurazione singola errata (vedere i messaggi di errore nel manuale completo).

SEGNALE ACUSTICO PROLUNGATO ———
Indica che sono state eseguite correttamente sei misurazioni e che il risultato della PIO è disponibile sul display.

DISPLAY DURANTE LE MISURAZIONI

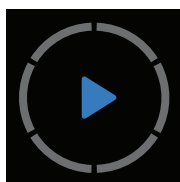

Prima



Dopo la seconda
misurazione



Dopo la sesta
misurazione




Dopo la sesta
misurazione ma con
variazione accettabile



Dopo la sesta
misurazione ma con
troppa variazione

COMPONENTI DEL TONOMETRO

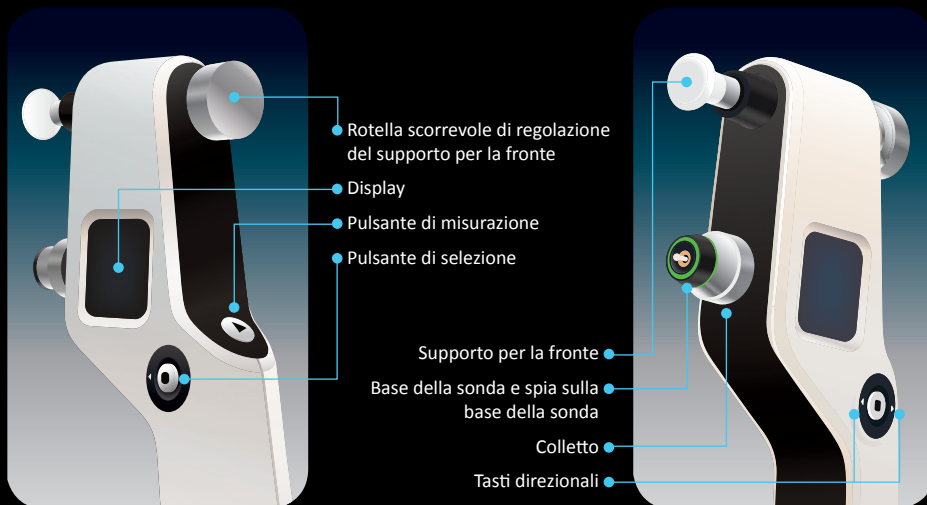

SOSTITUIRE / PULIRE A INTERVALLI REGOLARI LA BASE DELLA SONDA PER EVITARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NON NECESSARI.

PULIZIA DELLA BASE DELLA SONDA

È possibile riutilizzare la base della sonda dopo averla pulita con cura. Assicurarsi che la base della sonda sia completamente asciutta prima di usarla.

1. Svitare il colletto della base della sonda e rimuovere con cura tale base dal tonometro.
2. Capovolgere la base della sonda e immergerla in un recipiente contenente una soluzione di alcol al 70-100%, quindi lasciarvela a bagno per 5-30 minuti.
3. Asciugare la base della sonda spruzzandola con aria compressa.
4. Reinscrivere con cura la base della sonda completamente asciutta, quindi riavvitare il colletto nel tonometro.

Per istruzioni più dettagliate sulla sostituzione e sulla pulizia della base della sonda, fare riferimento al manuale.



www.icaretonometer.com

Per le informazioni aggiuntive, fare riferimento al manuale. 