





**VERKORTE  
HANDLEIDING**  
NEDERLANDS

**icare**  
**ic100**

Alleen  
op recept

## DE TONOMETER INSCHAKELEN EN DE PROBE LADEN

1. Druk op de selectie- of meetknop om de tonometer in te schakelen. Illustraties van deze alternatieve manieren om te starten: *(Vergeet niet om de polsband te gebruiken)*

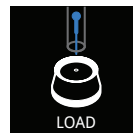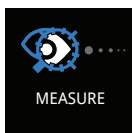

*Op de selectieknop drukken*

*Op de meetknop drukken*

2. Open het buisje voor de probe door het dopje te verwijderen en plaats de probe in de probe-basis zoals weergegeven op de afbeelding.




3. Wanneer het Play-symbool wordt weergegeven op de display, is de tonometer klaar voor metingen.





## METING

- Stap 1.** Vraag de patiënt zich te ontspannen en rechttuit te kijken naar een bepaald punt. Breng de tonometer naar het oog van de patiënt.

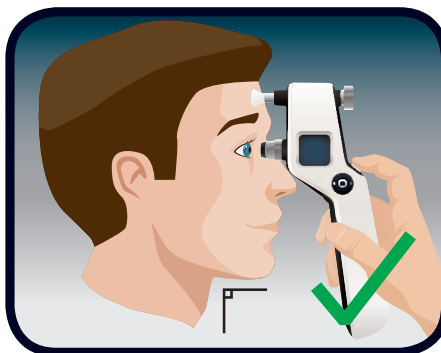

**Stap 2.** Houd de probe horizontaal zodat deze in een rechte lijn naar het centrum van het hoornvlies wijst. De afstand tussen de punt van de probe en het hoornvlies van de patiënt moet 4-8 mm zijn. Het lampje op de probe-basis moet groen zijn.

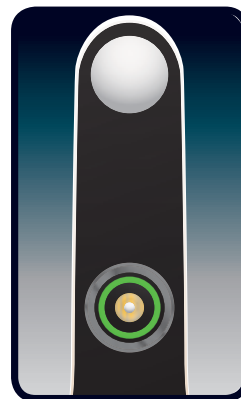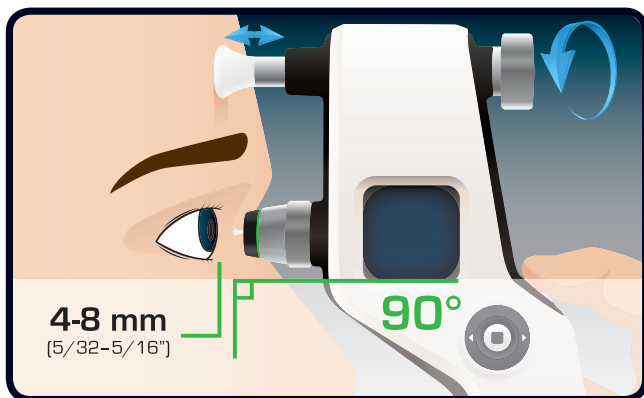

*Groen indicatie-lampje op probe-basis*

**Stap 3.** Druk op de meetknop om IOP te meten.

De probe komt in contact met de ogen tijdens het meten: Houd de knop ingedrukt om 6 metingen achter elkaar op te halen OF druk 6 keer kort op de knop om 1 meting per keer te doen.



**EEN KORTE PIEPTOON** —

Duidt op een correcte, enkele meting.


**DUBBELE PIEPTOON** — —

Duidt op een onjuiste, enkele meting. (Zie foutmeldingen in de volledige handleiding).

**LANGE PIEPTOON** ———

Geeft aan dat er zes succesvolle metingen zijn verricht en dat een IOP-resultaat beschikbaar is op de display.

## WEERGAVE TIJDENS METINGEN

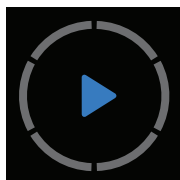

Voor




Na de tweede meting



Na de zesde meting




Na de zesde meting  
maar met een  
acceptabele variatie

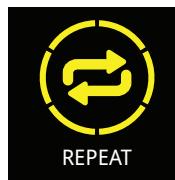

Na de zesde meting  
maar met teveel  
variatie

## ONDERDELEN VAN DE TONOMETER

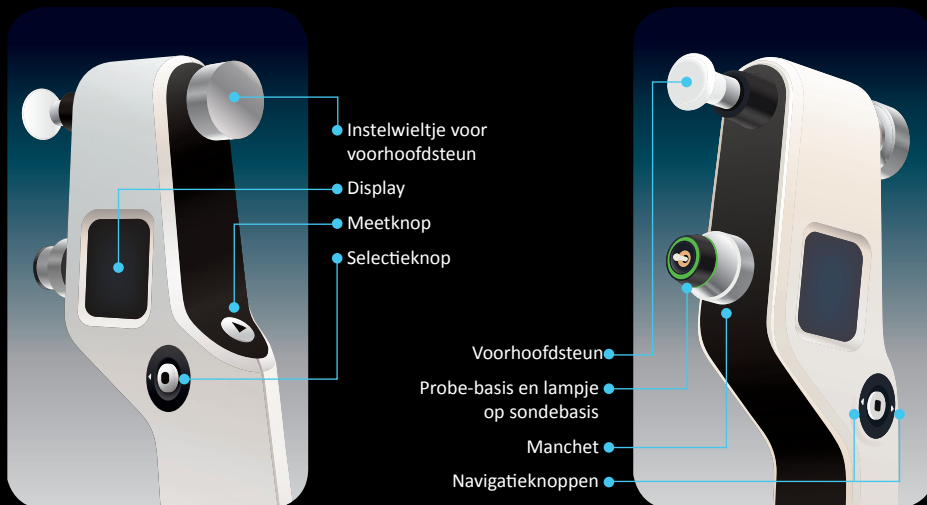

## VERVANG/REINIG DE PROBE-BASIS REGELMATIG OM ONNODIGE REPARATIES TE VOORKOMEN.

### DE PROBE-BASIS REINIGEN

De probe-basis kan worden hergebruikt na zorgvuldige reiniging. Zorg ervoor dat de probe-basis voor gebruik volledig droog is.

1. Draai de manchet van de probe-basis los en verwijder de probe-basis die nog bevestigd is aan de houder, uit de tonometer.
2. Keer de probe-basis om boven een bakje gevuld met 70-100%-alcoholoplossing, laat de sondebasis in het bakje vallen en laat deze 5-30 minuten weken.
3. Droog de probe-basis door perslucht in de probe-basis te blazen.
4. Plaats de volledig droge probe-basis terug, schroef de manchet terug in de tonometer.

Raadpleeg de handleiding voor meer gedetailleerde instructies voor het vervangen en reinigen van de probe-basis.

