



SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



POLSKI

icare
ic100

Tylko
na receptę

WŁĄCZANIE TONOMETRU I UMIESZCZANIE SONDY

1. Naciśnij przycisk wyboru lub przycisk pomiaru, aby włączyć tonometr. Poniżej ilustracje obrazujące alternatywne sposoby uruchomienia urządzenia: *(pamiętaj, aby użyć mocowania na nadgarstek)*

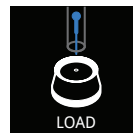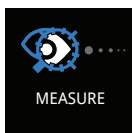

Naciśnięcie przycisku wyboru

Naciśnięcie przycisku pomiaru

2. Otwórz opakowanie sondy i umieść sondę w podstawie sondy jak pokazano na ilustracji.




3. Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol odtwarzania, będzie to oznaczać, że tonometr jest gotowy do pomiaru.





POMIAR

- Krok 1.** Poproś pacjenta o przyjęcie wygodnej pozycji i skierowanie wzroku w określony punkt. Przybliż tonometr do oka pacjenta.

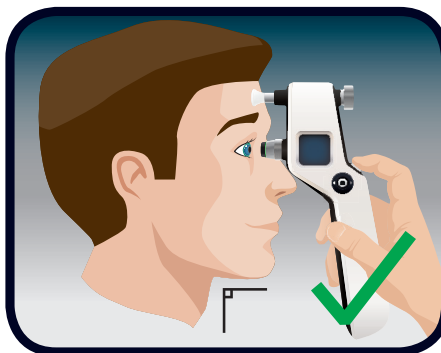

Krok 2. Przyłóż tonometr tak, aby sonda znajdowała się pod kątem prostym względem środka rogówki. Odległość końcówki sondy od rogówki pacjenta powinna wynosić 4 – 8 mm (5/32 – 5/16 cala). Kontrolka podstawy sondy musi świecić na zielono.

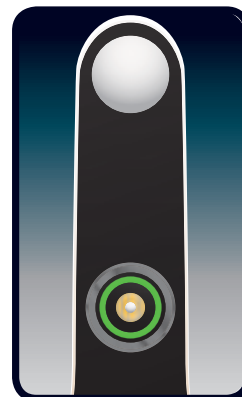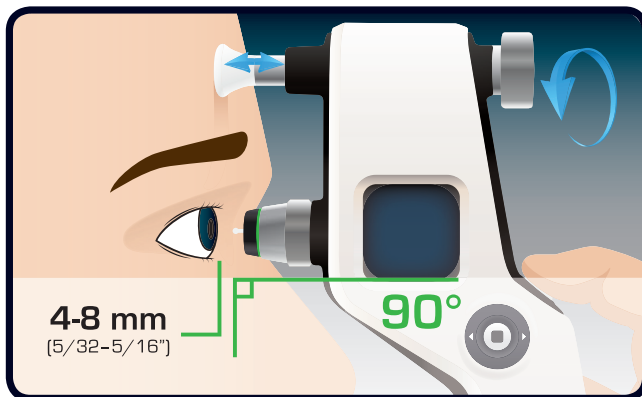

Kontrolka podstawy sondy świecąca na zielono

Krok 3. Naciśnij przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Sonda delikatnie dotknie powierzchni gałki ocznej podczas pomiaru: Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby wykonać 6 pomiarów jednocześnie LUB naciśnij przycisk krótko 6 razy, aby uzyskać 6 pojedynczych pomiarów.



JEDEN KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY —

Wskazuje, że wykonany pojedynczy pomiar jest poprawny.


PODWÓJNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY — —

Wskazuje, że wykonany pojedynczy pomiar jest niepoprawny. (Zapoznaj się z komunikatami błędów z pełnej instrukcji obsługi).

DŁUGI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ———

Wskazuje, że 6 pomiarów zostało wykonanych pomyślnie – wartość ciśnienia wewnątrzgałkowego widoczna jest na wyświetlaczu.

WSKAZANIA WYŚWIETLACZA PODCZAS POMIARÓW

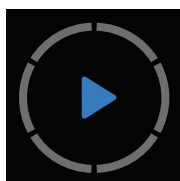

Przed




Po drugim pomiarze



Po szóstym pomiarze




Po szóstym pomiarze przy dopuszczalnym odchyleniu

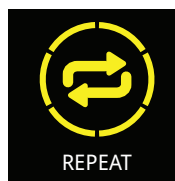

Po szóstym pomiarze w przypadku zbyt dużych odchyień

CZĘŚCI TONOMETRU

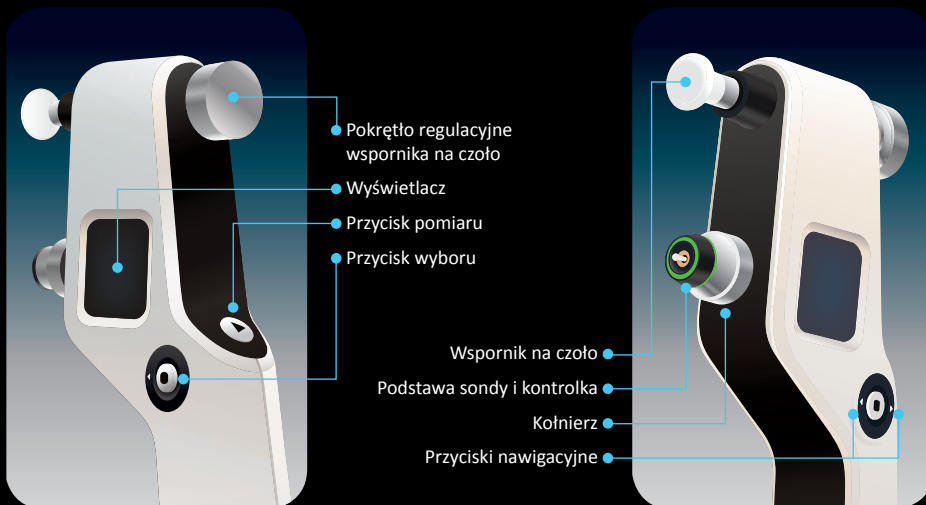

WYMIENIAJ/CZYŚĆ PODSTAWĘ SONDY REGULARNIE, ABY UNIKNĄĆ NIEPOTRZEBNEGO SERWISOWANIA.

CZYSZCZENIE PODSTAWY SONDY

Podstawa sondy może być ponownie wykorzystana po dokładnym jej oczyszczeniu. Przed użyciem upewnij się, że podstawa sondy jest całkowicie sucha.

1. Odkręć kołnierz podstawy sondy i ostrożnie odłącz podstawę od tonometru.
2. Odwróć podstawę sondy nad pojemnikiem wypełnionym 70 – 100% roztworem alkoholu, a następnie umieść ją w roztworze i pozostaw w nim na 5 do 30 minut.
3. Wyszusz podstawę sondy za pomocą sprężonego powietrza.
4. Ostrożnie umieść całkowicie suchą podstawę sondy w tonometrze i dokręć kołnierz.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących wymiany i czyszczenia podstawy sondy znajduje się w instrukcji obsługi.

www.icaretonometer.com



W celu uzyskania dodatkowych informacji należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

