



GUIA RÁPIDO

PORTUGUÊS

icare
ic100

Apenas
com
receita
médica

LIGAR O TONÓMETRO E COLOCAR A SONDA

1. Carregue no botão Select (Selecionar) ou Measure (Medir) para ligar o tonómetro. Ilustrações dos métodos alternativos para ligar o tonómetro: *(Não se esqueça de utilizar a correia de pulso)*



Carregando no botão Select (Selecionar)



Carregando no botão Measure (Medir)

2. Retire a tampa para abrir o tubo da sonda e, em seguida, introduza a sonda na respetiva base, conforme é mostrado na imagem.




3. Quando o símbolo de Play (Medição) aparecer no visor, o tonómetro estará pronto para efetuar medições.





MEDIÇÃO

- Passo 1.** Diga ao paciente para relaxar e olhar em frente para um ponto específico. Aproxime o tonómetro do olho do paciente.

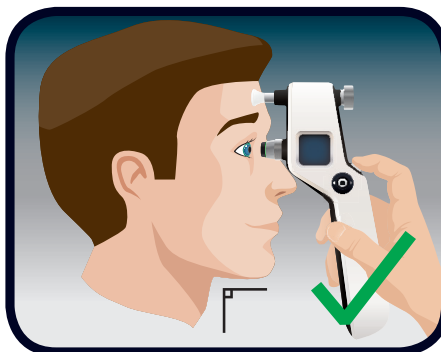

Passo 2. Mantenha a sonda na horizontal e aponte-a perpendicularmente para o centro da córnea. A distância entre a ponta da sonda e a córnea do paciente deve ser de 4 a 8 mm (5/32 - 5/16 pol.). A luz da base da sonda deve estar verde.

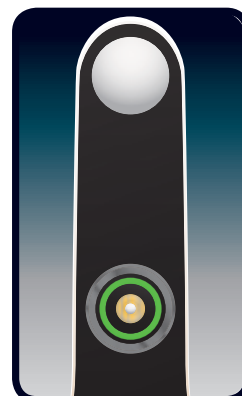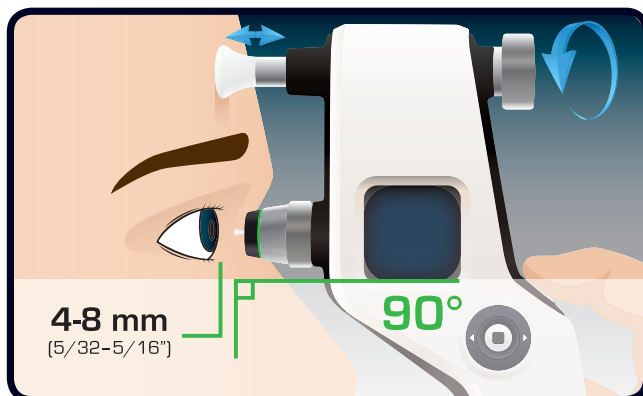

Indicação da luz da base da sonda verde

PASSO 3. Carregue no botão Measure (Medir) para medir a PIO (Pressão intra-ocular).

A sonda entrará em contacto com o olho durante as medições: Carregue sem soltar o botão para efetuar seis medições consecutivas OU Carregue brevemente no botão seis vezes para efetuar uma medição de cada vez.



UM SINAL SONORO BREVE —

Indica uma medição individual correta.


SINAL SONORO DUPLO — —

Indica uma medição individual incorreta. (Consulte as mensagens de erro apresentadas no manual completo).

SINAL SONORO LONGO — — — —

Indica que foram efetuadas seis medições bem-sucedidas e o resultado da PIO é apresentado no visor.

VISOR DURANTE AS MEDIÇÕES

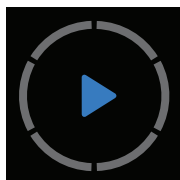

Antes




Após a segunda medição



Após a sexta medição




Após a sexta medição mas com uma variação aceitável

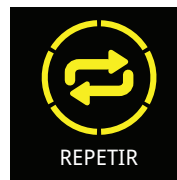

Após a sexta medição mas com uma variação excessiva

PEÇAS DO TONÓMETRO

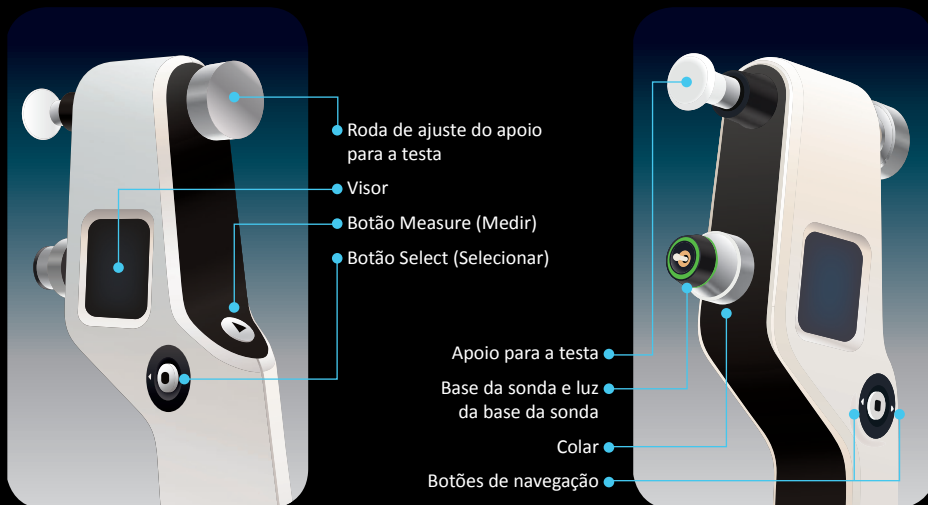

SUBSTITUIR/LIMPAR REGULARMENTE A BASE DA Sonda PARA EVITAR MANUTENÇÃO DESNECESSÁRIA.

LIMPAR A BASE DA Sonda

É possível reutilizar a base da sonda após uma limpeza cuidadosa. Certifique-se de que a base da sonda está totalmente seca antes de a utilizar.

1. Desenrosque o colar da base da sonda e retire cuidadosamente a base da sonda do tonómetro.
2. Inverta a base da sonda sobre um recipiente com uma solução de álcool de 70-100%; mergulhe a base da sonda no recipiente e deixe-a de molho entre 5 a 30 minutos.
3. Seque a base da sonda utilizando um jato de ar comprimido.
4. Com cuidado, volte a introduzir a base da sonda completamente seca no tonómetro e aperte o colar.

Consulte o manual para obter instruções mais detalhadas sobre a substituição e limpeza da base da sonda.



www.icaretonometer.com

Consulte o manual para obter informações adicionais. 