



KURZANLEITUNG

DEUTSCH

icare
ic100


Rx Only

EINSCHALTEN DES TONOMETERS UND LADEN EINES MESSGEBERS


1. Drücken Sie die Auswahl- oder die Mess-Taste, um das Tonometer einzuschalten. Abbildungen der zwei Möglichkeiten des Einschaltens: *(Denken Sie daran, die Handschlaufe zu verwenden.)*



Auswahl-taste

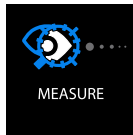

Mes-taste

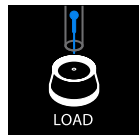

2. Nehmen Sie den Deckel vom Messgeberbehälter ab und lassen Sie den Messgeber wie in der Abbildung gezeigt in den Messgebereinsatz fallen.




3. Sobald das Play-Symbol auf dem Display angezeigt wird, ist das Tonometer messbereit.




MESSUNG

- Schritt 1.** Bitten Sie den Patienten sich zu entspannen und geradeaus auf einen bestimmten, etwas entfernten Punkt zu schauen. Halten Sie das Tonometer nah vor das Auge des Probanden.

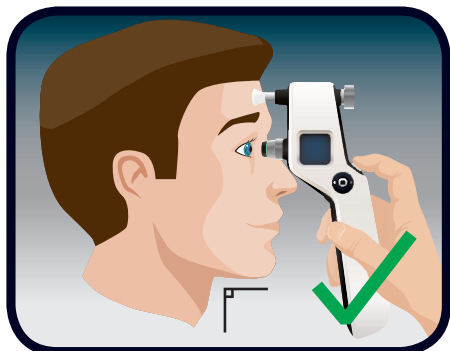

Schritt 2. Halten Sie den Messgeber so, dass er horizontal und senkrecht zur Mitte der Hornhaut zeigt. Der Abstand von der Spitze des Messgebers zur Hornhaut des Probanden/ Patienten sollte 4-8 mm betragen. Die Messgebereinsatzleuchte muss grün sein.

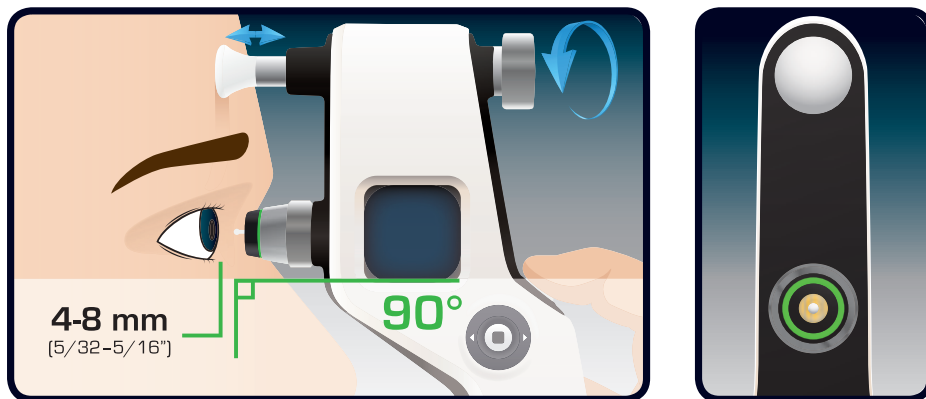

Grünes Licht der Messgebereinsatzleuchte

Schritt 3. Drücken Sie die **Messtaste**, um den Augeninnendruck zu messen (während den Messungen berührt der Messgeber das Auge). Drücken Sie die Taste und halten Sie sie gedrückt, um 6 Messungen nacheinander zu erfassen, oder drücken Sie kurz (1 Sekunde) 6-mal die Taste, um jeweils eine Messung zu erfassen.




EIN KURZER SIGNALTON —
Zeigt eine korrekte Einzelmessung an.

DOPPEL-SIGNALTON — —
Zeigt eine falsche Einzelmessung an. (Siehe Fehlermeldungen in der ausführlichen Gebrauchsanweisung).

LANGER SIGNALTON ———
Zeigt an, dass sechs erfolgreiche Messungen durchgeführt wurden und das Ergebnis des Augeninnendrucks am Display verfügbar ist.

DISPLAY WÄHREND DER MESSUNG

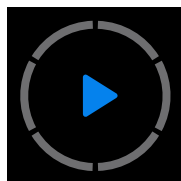

Vor der Messung



Nach der zweiten
Messung



Nach der sechsten
Messung




Nach der sechsten
Messung, jedoch
mit noch zulässigen
Schwankungen



Nach der sechsten
Messung, jedoch
mit inakzeptablen
Schwankungen

KOMPONENTEN DES TONOMETERS

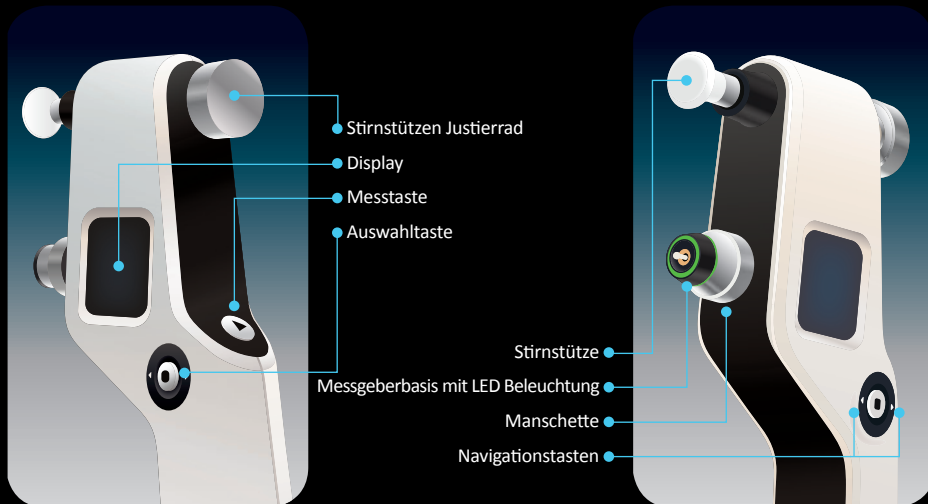

WECHSELN / REINIGEN SIE DEN MESSGEBERSITZ REGELMÄSSIG, UM UNNÖTIGEN SERVICE ZU VERMEIDEN

REINIGUNG DES MESSGEBERSITZES

Der Messgebersitz kann nach sorgfältiger Reinigung wiederverwendet werden. Stellen Sie sicher, dass der Messgebersitz vollständig trocken ist, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

1. Schrauben Sie die Manschette des Messgebersitzes heraus und entfernen Sie vorsichtig den Messgebersitz aus dem Tonometer.
2. Legen sie den Messgebersitz in einen, mit reinem Alkohol gefüllten, Behälter. Lassen Sie den Messgebersitz etwa 5-30 min. in der Lösung, damit sich alle Verschmutzungen lösen können.
3. Trocknen Sie den Messgebersitz gewissenhaft durch vorsichtiges Einblasen von Druckluft.
4. Setzen Sie den vollständig getrockneten Messgebersitz in das Tonometer ein und schrauben Sie daraufhin die Manschette wieder fest.

Bitte entnehmen Sie der Gebrauchsanweisung detaillierte Anweisungen zur Auswechslung und Reinigung des Messgebersitzes.

