



**SNABBMANUAL**  
SVENSK

**icare**  
**ic100**


Rx Only

## STARTA TONOMETERN OCH LADDA SONDEN


1. Tryck på Välj- eller mätknappen för att starta tonometern. Se bilder för båda dessa sätt att starta:  
(kom ihåg att använda handledsbandet).



Väljknapp

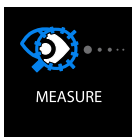

Mätknapp

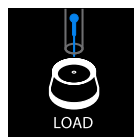

2. Öppna sondröret genom att ta bort den korta delen av plasthylsan och för in sonden i sondbasen såsom det visas på bilden.




3. När PLAY-symbolen visas på displayen är tonometern färdig att användas.




## MÄTNING

- Steg 1. Be patienten att koppla av och titta rakt fram på en särskild punkt. För tonometern mot patientens öga.

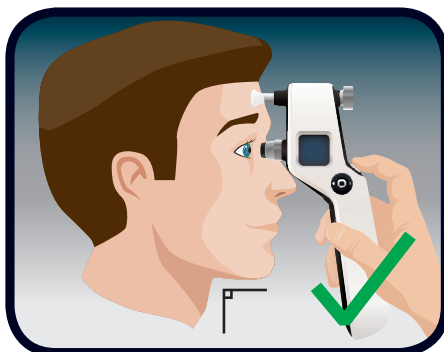

**Steg 2.** Håll sonden horisontellt och i rät vinkel mot hornhinnans mitt. Avståndet mellan sondens spets och patientens hornhinna måste vara 4-8 mm (5/32 – 5/16 tum) Sondbasens indikatorlampa måste lysa grönt.

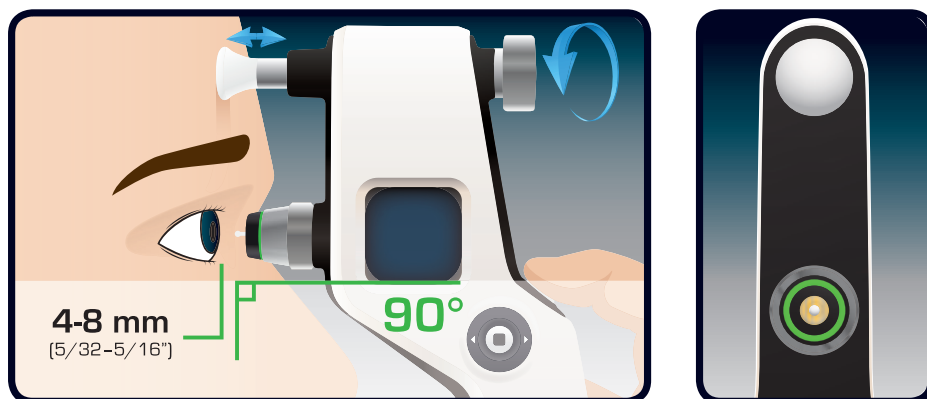

Sondbasens gröna indikatorlampa

**Steg 3.** Tryck in MÅT-knappen för att mäta intraokulärt tryck

Sonden rör vid ögat under mätningen. Tryck och håll in knappen för att spara 6 mätningar i rad ELLER tryck in knappen kort 6 gånger för att spara 1 mätning åt gången.




**EN KORT TON** —  
Indikerar en korrekt enkelmätning

**DUBBELTON** — —  
Indikerar en felaktig enkelmätning

**LÅNG TON** — — — — —  
Indikerar att sex korrekta mätningar har utförts och IOP-resultatet finns tillgängligt på displayen.

## DISPLAYEN UNDER MÄTNINGEN

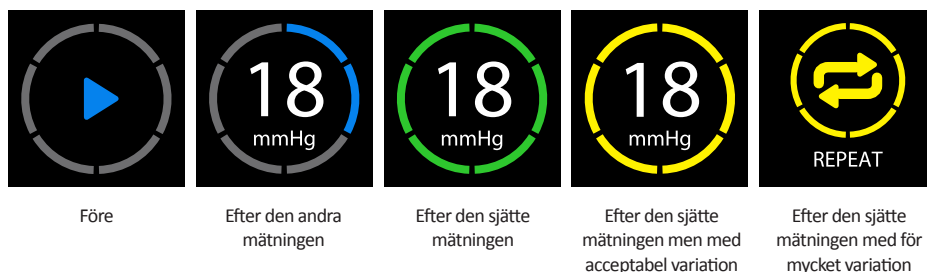

Före


Efter den andra  
mätningen

Efter den sjätte  
mätningen

Efter den sjätte  
mätningen men med  
acceptabel variation

Efter den sjätte  
mätningen med för  
mycket variation

## TONOMETERNS DELAR

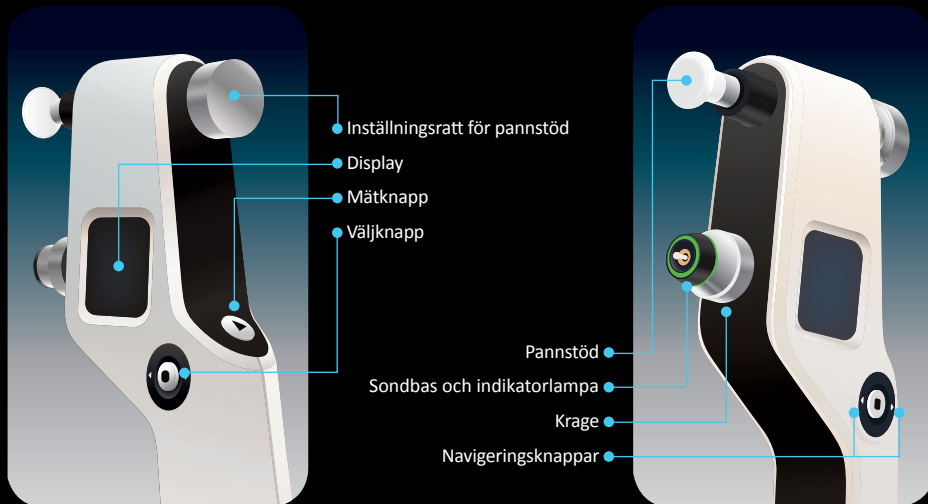

## BYT/RENGÖR SONDBASEN REGELBUNDET FÖR ATT UNDVIKA ONÖDIG SERVICE/UNDERHÅLL

### RENGÖRING AV SONDBASEN

Sondbasen kan återanvändas efter noggrann rengöring. Försäkra er om att sondbasen är helt torr innan man använder den.

1. Skruva bort sondbasens krage och ta försiktigt bort sondbasen från tonometern.
2. Vänd sondbasen över en behållare fylld med ren alkohollösning och låt sondbasen falla ner i behållaren och låt den dra i 5-30 minuter.
3. Torka sondbasen genom att blåsa tryckluft genom den.
4. Sätt försiktigt tillbaka den helt torra sondbasen. Skruva åter på kragen på tonometern.

Se bruksanvisningen för mer detaljerade instruktioner gällande byte och rengöring av sondbasen.

